



Cucut

mamá & bebé



Cojín **específico** LACTANCIA



LACTANCIA SIN
ESFUERZO



Cojín **específico** LACTANCIA

Diseñado y pensado exclusivamente como soporte y ayuda eficaz al proceso de lactancia y recuperación postural de la mamá en el puerperio evitándole sobre esfuerzos y tensiones en espalda, cervicales y antebrazo. Favorece una correcta posición de la mamá y del bebé evitando el cansancio postural y abandonos prematuros de la lactancia. La aparente dureza del cojín es la adecuada funcionalmente para que el bebé se sienta cómodo y desahogado. Al mismo tiempo ayuda al bebé a mantener durante toda la toma una posición adecuada favoreciendo una correcta succión. Producto recomendado por matronas y profesionales del sector.

EL ÉXITO DE LA LACTANCIA ES QUE RESULTE PLACENTERA PARA MAMÁ Y BEBÉ

SEGURA

Se adapta al contorno de la mamá de forma anatómica.
El cojín queda sujeto y fijado al cuerpo de la mamá.
Refuerzos en anclajes y cierre de seguridad.

CÓMODA

Mantiene la espalda en posición correcta.
Confortable apoyo lumbar acolchado.
Bandolera regulable "al hombro" de sostén.
Reparto uniforme del peso del bebé.

RELAJADA

Al formar todo un conjunto, mamá y cojín, proporciona un efecto de tranquilidad y seguridad que proporciona el control de la situación con mayor libertad de movimientos incluso liberando una mano con plena seguridad.



PROTECTOR REVERSIBLE Y ABSORVENTE (ALG.100%) • TRES PRÁCTICOS BOLSILLOS LATERALES • BOLSA DE PROTECCIÓN Y TRANSPORTE

Relleno interior espuma de poliuretano (15 Kg/m³). Funda extraíble y lavable. Tejido: 50% algodón 50% poliéster.

VER INSTRUCCIONES AL DORSO


INSTRUCCIONES DE USO Y CONSERVACIÓN

Cojín específico de lactancia



CÓMO SE COLOCA:

Su estudiada forma y consistencia rodea y se ajusta a la cintura de la mamá. Ello permite una buena colocación en altura y posición del bebé así como el reparto uniforme del peso del mismo. Al mismo tiempo y gracias al apoyo lumbar acolchado mantendremos la espalda de la mamá en la posición correcta. Todo ello facilita una lactancia **Cómoda, Segura y Relajada** facilitando, al mismo tiempo, la recuperación postural de la mamá en el posparto.

El **primer paso** será la correcta adaptación del Cojín a las características de la mamá y bebé. Para ello se dispone de tres anclajes de seguridad colocados en las respectivas cintas ajustables de cintura (delanteras) y bandolera al hombro (delanteras y posterior).

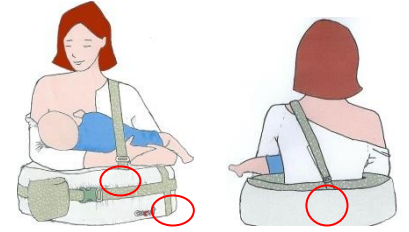


• **La de cintura** tiene que quedar ajustada a tu contorno abdominal, sin quedar suelta, con una ligera presión sobre tu abdomen. Utiliza el dispositivo regulador de ajuste (1) Inicialmente tu abdomen puede presentar el típico hinchazón posparto que al desaparecer hará que el Cojín se te adapte mejor. El conjunto queda fijado gracias al cierre de seguridad delantero (2)

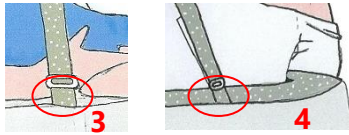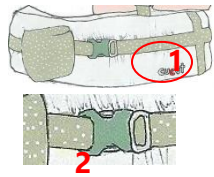

• **La bandolera** al hombro. Deberás ajustar su altura utilizando los reguladores, trasero y delantero (3 y 4). Se recomienda situar la cinta bandolera con la parte del velcro más larga en la espalda, en el anclaje del refuerzo lumbar.

• **Finalmente** tienes que situar el Cojín de Lactancia a la altura y posición que permita a tu bebé que su boca quede enfrentada a tu pezón. Para ello abrazaras a tu bebé en la posición de lactar y ajustaras el Cojín siguiendo las instrucciones anteriormente indicadas.

Se recomienda un primer ajuste tranquilo, sin el bebé, para familiarizarse con el Cojín de lactancia. En estos primeros meses tu bebé crecerá rápidamente por lo que deberás ir ajustando la colocación del Cojín.

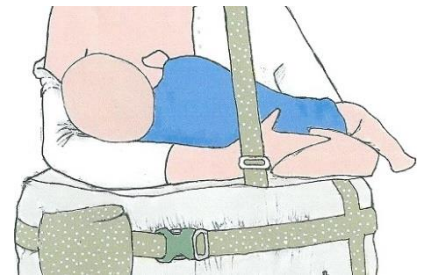

UNA BUENA POSICIÓN GARANTIZA UNA BUENA SUCCIÓN

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA:



Después de su uso recomendamos guardarlo en su bolsa de protección y transporte.

Tanto el Protector removible como la funda del Cojín pueden ser lavados normalmente.

Se recomienda utilizar jabones neutros, los mismos de la ropita del bebé.

No utilices blanqueadores o quitamanchas que contengan componentes agresivos.

Mejor secarlos de forma natural y si por premura de tiempo lo haces en secadora utiliza un programa en frío.

El relleno de espuma no tiene que lavarse. En ocasiones pueda "amarillear" su color, no tiene importancia, ello es causa de la oxidación normal de la espuma por el contacto con el aire o exposición al sol al no aplicársele procedimientos químicos de conservación para un respeto más ecológico.

ADVERTENCIA: No utilice el Cojín de Lactancia como una mochila de transporte. Utilización exclusiva por adultos. Guarda estas instrucciones para posibles consultas posteriores.

Los productos CUCUT tienen 2 años de garantía. La Garantía no incluye daños causados por un uso indebido o no seguir las indicaciones de conservación del fabricante. CUCUT, y por extensión boenvi comunicació sl no se hace responsable de daños materiales o personales causados por un uso inapropiado de sus productos. info@cucut.es www.cojindelactanciacucut.com